

Masque barrière suivant notice

AFNOR SPEC S76-001 : 2020



Caractéristiques techniques


- Modèle : masque barrière 3 plis
- Type de tissu : 2 couches
100 % coton
- Grammage : 260 g/m²

Utilisation du masque

- La durée du port du masque barrière sera inférieur à 4h
- Contact direct avec la peau (vérifier que le masque couvre bien le menton et le nez)
- 20 lavages minimum
- Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains
- Retrait du masque par l'arrière des élastiques, sans toucher la partie avant
- Ne pas utiliser le masque s'il est souillé ou mouillé

Entretien

- Lavage minimum à une température de 60° durant 30 mn
- Utilisation de la lessive habituelle
- Séchage complet du masque dans un délai inférieur à 2h
- Pas de séchage à l'air libre, pas d'utilisation du micro-ondes
- Lavage recommandé avant la première utilisation

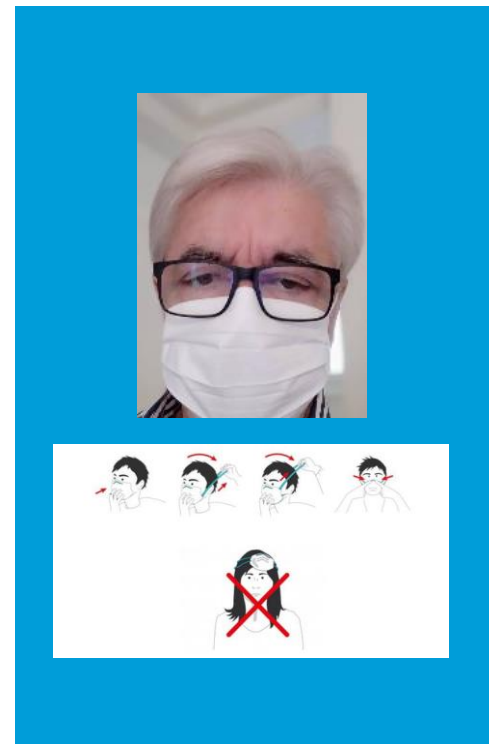

Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2)

